

Vastrip® 2+

Den fleksible venestripper



Nytt betjenings-
vennlig håndtak

Vastrip® 2+ er et høykvalitetsprodukt som enkelt kan benyttes ved ulike venestrippingsteknikker.

Venestripping er standard prosedyre ved behandling av åreknuter. Behandlingen har bedre langtidsresultater enn scleroterapi (1) eller saphenofemoral ligering alene (2). Vastrip® 2+ er en populær høykvalitets venestripper med en unik fleksibilitet. Innføring kan gjøres i begge retninger ved bruk av enten den rette eller spiralformede enden. Dersom konvensjonell stripping er nødvendig kan det valgte endestykket plasseres på ønsket ende av stripperen og tillater dermed enten å dra den igjennom i innført retning eller tilbake mot innført retning. Alternativt kan Vastrip® 2+ benyttes til invaginassjon eller ministripping ved å benytte en ligatur gjennom hullet i enden av stripperen. Håndtaket kan posisjoneres og flyttes under strippingen. Den sterile holderen som er en del av forpakningen sørger for sikker oppbevaring av stripperen og håndtaket inntil den skal benyttes.

- **Passer til forskjellige venestrippingsteknikker: konvensjonell, invaginassjon eller ministripping**
- **Lett å føre inn og kontrollere under hele operasjonen**
- **Toveis stripper med spiralformet og rett ende**
- **Tre endestykker inkludert (9, 12, 15mm)**
- **Justerbart håndtak gir ekstra drakraft**


Holder

Vastrip® 2+ leveres med en steril holder.




Endestykker


Velg mellom de 3 forskjellige størrelsene 9mm, 12mm, 15mm.

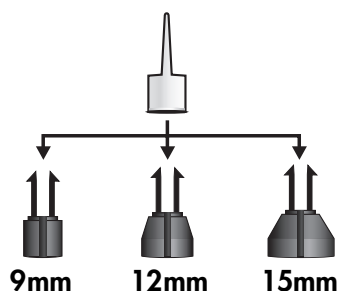

Rett ende

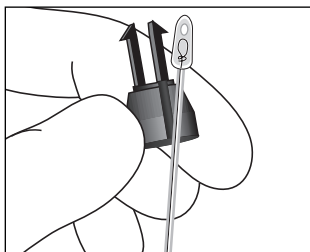



Spiralformet ende

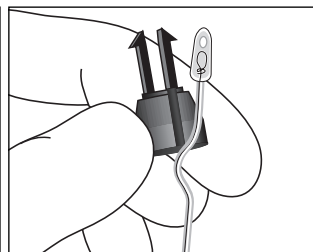

Enden er enten rett eller spiralformet og er utstyrt med hull som muliggjør bruk av ligatur ved invaginasjonsstripping.

Håndtak

En av de unike egenskapene ved Vastrip® 2+ er det justerbare håndtaket. Det gir ekstra dra-kraft under strippingen.

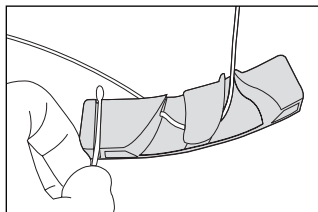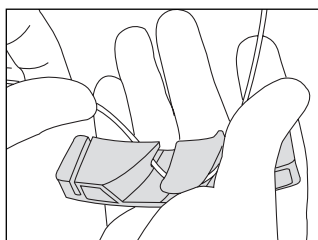

Beskrivelse

Materiale

Rustfritt stål (kjerne), polykarbonat (belegg på stripperen), Acetale (endestykker), ABS (håndtak).

Sterilisering

Produktene steriliseres ved bruk av etylenoksid.

Engangsinstrument

Alle komponenter er produsert for engangsbruk. Må ikke brukes dersom pakningen er skadet.

PRODUKTSPEKTER – VASTRIP® 2+

Artikkelnummer

Forpakning

67321

1x10

CE 0088

STERILE EO



Single use/Monouso/
Einmalgebrauch/Usage unique

Referanser:

1. Einarsson E, Eklöf B, Neglén P. Sclerotherapy or surgery as treatment for varicose veins: a prospective randomized study. *Phlebology* 1993;8:22-26.
2. Dwerryhouse S. Stripping the long saphenous vein reduces the rate of reoperation for recurrent varicose veins: five-year results of a randomized trial. *Journal of Vascular Surgery*, 1999;29:589-92.